

Verkorte handleiding hCG

Versie 2
(16-03-21)

Autorisatie Bijlage


Naam	Functie	Handtekening
Dr. Zwart	Directeur	

1. WERKWIJZE

1.1. Uitvoering

Open het foliezakje pas wanneer de analyse wordt uitgevoerd.

- Haal de reactieschijf uit het foliezakje.
- Plaats de schijf op een schone, platte en droge ondergrond.
- Zuig, m.b.v. de transferpipet, monster op tot de lijn die op de pipet is aangegeven (1).
- Pipetteer de hele inhoud druppelsgewijs aan in de monsterschacht van de reactieschijf (2). Gebruik voor elk monster een aparte transferpipet en reactieschijf.

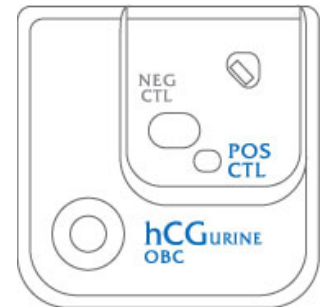

- Wacht totdat een roze/rode kleur verschijnt in het End of Assayvenster (3), na ongeveer 5 minuten.
- Lees de resultaten af. Negeer resultaten die hierna verschijnen.

1.2. Beoordeling

Het resultaat beoordelen zoals hieronder aangegeven. Het linker en middelste voorbeeld zijn positief, het rechter voorbeeld is negatief.



Let op, voor een juist resultaat moet:

- De dwarsbalk (het minteken) op het resultatenvenster duidelijk zichtbaar zijn.
- De POS CTL (✓) in het daartoe bestemde POS CTL-venster duidelijk zichtbaar zijn.
- Het End of Assay-venster een roze/rode kleur hebben.

Een onduidelijk resultaat of de afwezigheid van bovenstaande controles duidt op incorrecte toevoeging van het monster of bederf van de reactieschijf.