



Autorisatie Bijlage

Naam	Functie	Handtekening
Dr. A. Zwart	Directeur	

AFNAMEMATERIAAL PATHOLOGIE**Fixeren van materialen in het juiste fixatief**

Fixatief	Voor	Fixatie instructies	Bewaren na afname
Formaline 4 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Huidbiopten/stansen • Vulvabiopten • Overige afgenomen weefsels 	Na afnemen DIRECT in de formaline doen, potje goed afsluiten. NB: Indien meerdere biopten/stansen genomen worden, deze in aparte potjes fixeren en de potjes markeren met de locatie van afname. Potjes met afgenomen materiaal moeten minimaal naam en geboortedatum van de patiënt bevatten.	20-25°C
Preservcyt® 	<ul style="list-style-type: none"> • Cervixuitstrijken 	Cervixbrush na afname van de uitstrijk de brush zo snel mogelijk in de Preservcyt® stoppen en de brush goed op de bodem uitdrukken, brush omhoog halen en opnieuw op de bodem drukken, dit 10x herhalen tot slot de brush goed ronddraaien in de vloeistof zodat het materiaal in de vloeistof komt. Dan het potje goed sluiten (let op de paarse lijn). Potjes met afgenomen materiaal moeten minimaal naam en geboortedatum van de patiënt bevatten.	20-25°C

Het aanvraagformulier

Het aanvraagformulier **MOET** de volgende gegevens bevatten om uw aanvraag te kunnen verwerken.

Patiëntgegevens	Gegevens inzending	Gegevens aanvragend arts:
<ul style="list-style-type: none"> • Naam patiënt, indien gehuwd ook meisjesnaam vermelden • Geboortedatum • Geslacht • Adres • BSN-nummer 	<ul style="list-style-type: none"> • Aard materiaal • Klinische gegevens • Vraagstelling 	<ul style="list-style-type: none"> • Naam aanvragend arts • Adresgegevens aanvragend arts (praktijk) • Telefoonnummer