

# Verwerken materiaal nadat de koerier is geweest

Versie 5  
(22-07-20)

## Autorisatie Bijlage

Naam	Functie	Handtekening
Dr. Zwart	Directeur	

## 1. VERWERKEN MATERIAAL

Soort buis	Dop buis	Afdraaien	Opslag (na afdraaien)	Verzenden
Serum (o.a. chemie)	Rood/geel 	Ja *	Koelkast	Kamertemperatuur
NaF (glucose)	Grijs/ wit 	Nee	Koelkast	Kamertemperatuur
EDTA gel (BNP)	Paars/geel 	Ja	Koelkast	Kamertemperatuur
EDTA (VitB1, VitB6, bloedbeeld/ HbA1c)	Paars/zwart 	Nee	Koelkast**	Kamertemperatuur

\* Serumbuis voor afdraaien eerst 30 minuten rechtop laten staan bij kamertemperatuur.

\*\* Indien er een differentiatie is aangevraagd, 2 bloeditstrijkjes maken.

## 2. BEPERKINGEN

Soort buis	Dop buis	Opmerking
NaCitraat (stolling)	Blauw/zwart 	Bepaling niet mogelijk

## 3. BEWAREN

- Vul de afnamedatum en tijd in op aanvraagformulier.
- Plaats het materiaal op de juiste positie in de transportbox "middag-avond afname". Links van de box beginnen. Per patiënt de buizen achter elkaar plaatsen. Bij volgende patiënt de buizen in nieuwe rij beginnen.
- Doe de aanvraagformulieren en kopie daglijst in de bijbehorende plastic map.
- Box plaatsen in de koelkast totdat de koerier deze de volgende dag komt ophalen.
- In deze box geen buizen plaatsen van de volgende dag.


### 3.1. Storingsafhandeling

Alle storingsafhandelingen dienen gemeld te worden aan de labmanager (of diens vervanger) van U-Diagnostics. Te bereiken op telefoonnummer 030-7740220. Alleen een medewerker van U-Diagnostics is bevoegd om de centrifuge na een storing weer vrij te geven. Alle storingsafhandelingen en ondernomen acties worden door een medewerker van U-Diagnostics in het logboek genoteerd. Het logboek is aanwezig op U-Diagnostics.

# Verwerken materiaal nadat de koerier is geweest

Versie 5  
(22-07-20)

## 4. UITLEG VAN DE CENTRIFUGE

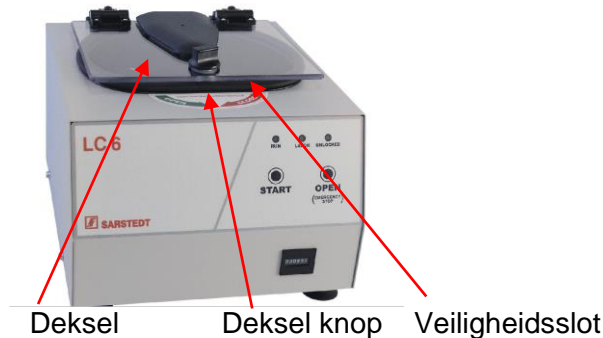

### Drie lampjes:

- RUN
- LATCH
- UNLOCKED

### Twee toetsen:

- START
- OPEN (EMERGENCY STOP)

## 5. WERKWIJZE

### 5.1. Afdraaien van het materiaal

#### 5.1.1. Algemeen

**Let op:** Indien de centrifuge acuut moet worden gestopt, druk dan op de "OPEN (EMERGENCY STOP)" knop.

#### 5.1.2. Het laden van de centrifuge

- Druk op de toets "OPEN (EMERGENCY STOP)" om het deksel te openen.
- Plaats de monsterbuizen (alleen diegene die moeten worden afgedraaid) in de buishouders.
- Laad de centrifuge gelijk verdeeld. D.w.z. dat buizen van gelijke grote en met dezelfde hoeveelheid inhoud tegenover elkaar worden geplaatst. Maak zo nodig gebruik van een even grote buis gevuld met water.

#### 5.1.3. Bediening van de centrifuge

- Sluit het deksel en draai de dekselknop vast. Het "LATCH" lampje gaat branden. Indien de dekselknop niet goed is vastgedraaid, zal het "LATCH" lampje niet gaan branden en zal de centrifuge niet kunnen gaan draaien.
- Druk op de "START" knop. De rotor zal beginnen met draaien en het "RUN" lampje gaat branden.
- Aan het einde van de centrifugetijd, zal het "RUN" lampje uitgaan en de rotor af gaan remmen totdat deze helemaal stilstaat. Dan zal het "UNLOCKED" lampje gaan branden en het veiligheidsmechanisme van het slot worden uitgeschakeld.
- Druk op de "OPEN (EMERGENCY STOP)" knop en draai de dekselknop los om het deksel te openen.
- Verwijder de monsterbuizen. De centrifuge is direct weer klaar voor gebruik.