

# Verkorte handleiding Uricult

Versie 2  
(16-03-21)

## Autorisatie Bijlage

Naam	Functie	Handtekening
J.M. Cuffy-van Maarseveen	Labmanager	

## 1. INZETTEN URICULT

Schroef de dop met daaraan de agarhouder (slide) los van het buisje zonder het agar oppervlak op de slide te raken.



- Roer of schud de urine.
- Doop de slide in de verse urine totdat de agar totaal is ondergedompeld. Indien hiervoor de hoeveelheid urine onvoldoende is, kan de urine ook over de agar worden gegoten. Zorg er dan wel voor dat de agar volledig bedekt is met urine.




- Laat de overtollige urine van de slide lopen.
- Verwijder de laatste druppels met een schoon absorberend papiertje.
- Schroef de slide weer terug in het buisje.
- Vul het bijgevoegde label in en plak het op het buisje.



- Plaats het buisje rechtop in een stoof (ongeveer 37°C) gedurende 16 tot 24 uur. Als de Uricult niet in gestelde tijd kan worden afgelezen bijvoorbeeld door het weekend dan dient de Uricult bij kamertemperatuur te worden geplaatst en op maandags te worden afgelezen.

## 2. BEOORDELEN URICULT

- Haal de Uricult uit de stoof.
- Lees de 2 agar oppervlaktes met behulp van de afleeskaarten af. Zie bijsluiter en afbeelding hieronder. Het is van belang om naar de hoeveelheid bacteriën te kijken, grote is niet belangrijk. Vanaf  $10^4$  CFU/ml wordt de Uricult als positief beschouwd.

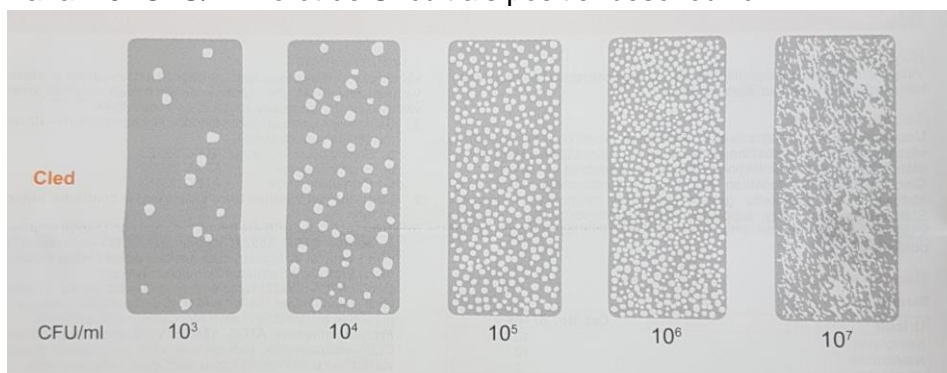

## 3. RESULTAAT

Noteer de resultaten op formulier "O460\_F20" ("Uitslagen Uricult") geschreven. Als de uitslag  $10^3$  CFU/ml is dan negatief aanvinken. Bij een uitslag van  $10^4$  CFU/ml of hoger positief aanvinken. Het formulier moet meegegeven worden met de koerier.