

Verkorte handleiding Clinitek Status, gekoppeld

Versie 4
(22-07-20)

Autorisatie Bijlage




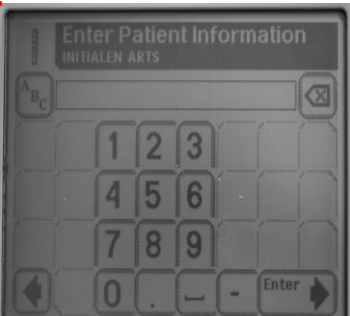
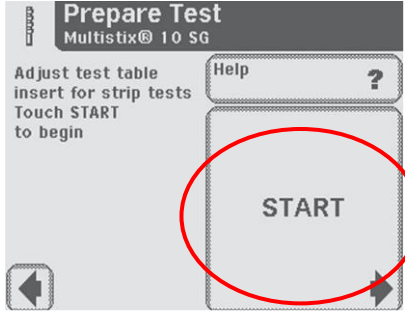
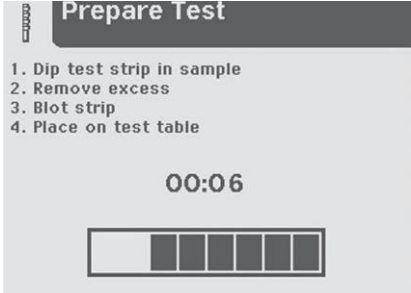

Naam	Functie	Handtekening
Dr. Zwart	Directeur	

1. WERKWIJZE

1.1. Opstartprocedure

Zet de Clinitek Status+ aan met de ① knop op het apparaat.

1.2. Uitvoering
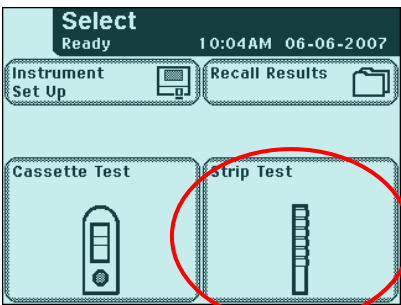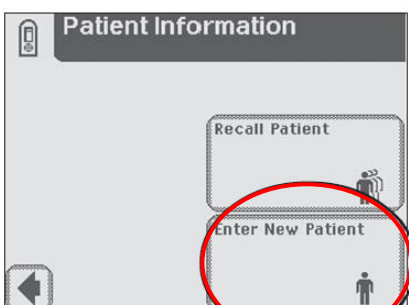
<p>1</p>  <p>Druk <Strip Test></p>	<p>2</p>  <p>Druk <Enter New Patient></p>	<p>3</p>  <p>Toets het BSN nummer in van de patiënt en druk op <Enter>.</p>
<p>4</p>  <p>Indien van toepassing: Initialen arts invoeren</p>	<p>5</p>  <p>Meng het monster. Pak een teststrip. Druk <START></p>	<p>6</p>  <p>Doop een teststrip in het monster. Dep de zijkant van de strip met tissue af om overtollig monster te verwijderen.</p>
<p>7</p>  <p>Plaats de teststrip in de striphouder.</p>	<p>8</p> <p>Het resultaat wordt automatisch verstuurd naar PC waar Mobihealth One™ is geïnstalleerd. Controleer op de PC of resultaat is ontvangen.</p> <p>Controleer het BSN en verzend de meting.</p>	<p>9</p> <p>Druk op <DONE>.</p> <p>Gooi de gebruikte teststrip weg en verwijder, wanneer het hele meetproces beëindigd is, de striphouder uit de Clinitek Status+ met een tissue.</p> <p>Einde van de dag testtafel en striphouder reinigen (Z.O.Z)</p>

Verkorte handleiding Clinitek Status, gekoppeld

Versie 4
(22-07-20)

2. KOPPELING


2.1. Verbinding

- Controleer voor het meten dat het lampje van de Firefly groen brandt en niet knippert.




2.2. Foutoplossing

- Als het Firefly lampje wel groen is maar knippert, controleer dan dat de PC aan staat en de Bluetooth adapter goed is aangesloten. Helpt dat niet, probeer dan de Firefly enkele seconden van de stroom af te halen.
- Als de draadloze verbinding niet in orde is (Firefly lampje knippert of is uit) zullen metingen niet op de PC aankomen. In dit geval kunnen metingen als volgt handmatig opnieuw verstuurd worden vanaf de Clinitek:

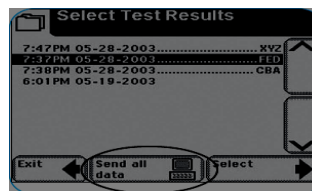

2.3. Metingen versturen

Het programma opent automatisch na ontvangst van nieuwe meting(en):

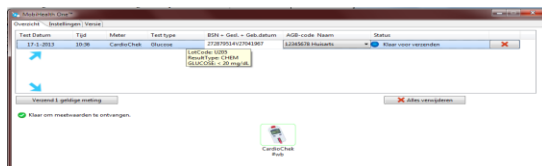

- Controleer het BSN en verzend de metingen met de verzend knop.
- Klik op "Alles verwijderen" als de metingen verstuurd zijn en u de metingen niet meer in het programma wil zien.

3. ONDERHOUD

3.1. Dagelijks

Aan het einde van de dag moet het onderstaande onderhoud worden uitgevoerd.

- Schuif de striphouder uit de urine stripezer om deze te reinigen.
- Verwijder de testtafel uit de Clinitek en reinig deze met water.
- Reinig vooral de groef, m.b.v. een wattenstokje met water. Raak de witte kalibratiestrook niet aan!
- Plaats de testtafel en striphouder op een tissue en laat deze aan de lucht drogen.
- Plaats de volgende ochtend, de striphouder terug in de testtafel en plaats deze weer volledig terug in de Clinitek.
- Zet het apparaat nu uit (druk enkele seconden op de ① knop). Zodra het apparaat weer aan wordt gezet zal het systeem worden gereset.