

Verkorte handleiding DCA Vantage voor HbA1c, gekoppeld

Versie 4
(22-07-20)

Autorisatie Bijlage

Naam	Functie	Handtekening
Dr. Zwart	Directeur	

1. WERKWIJZE

1.1. Conditie

- Voor gebruik moet de cassette op kamertemperatuur komen (dit duurt ca. 10 minuten).
- Bij opening van een nieuwe verpakking cassettes eerst de kalibratiekaart van de verpakking inscannen om de batch te registreren op de meter (via de barcode-gleuf op de analyzer).
- Zorg dat de DCA Vantage analyser gereed staat in de "Ready" stand.
- Neem een capillair en de cassette uit de verpakking.

1.2. Uitvoering

<p>1</p>  <p>Scan de cassette. Er klinkt een beep signaal.</p>	<p>2</p>  <p>Vul de capillair met bloed. Plaats de capillair in de cassette.</p>
<p>3</p>  <p>Plaats de cartridge in de DCA Vantage, totdat er een "klikgeluid" klinkt. Trek voorzichtig het folie uit de cassette. Sluit de klep. Druk <Patient ID> om het BSN in te geven <Enter>. Indien meerdere artsen, druk <Operator ID> om de arts-initialen in te geven <Enter>. Druk op <Next>.</p>	<p>4</p>  <p>Na 6 minuten verschijnt de uitslag op het scherm. Het resultaat wordt automatisch verstuurd naar PC waar Mobihealth One™ is geïnstalleerd. Controleer op de PC of resultaat is ontvangen. Controleer het BSN en verzend de meting.</p>

1.3. Cartridge verwijderen

- Druk op de knop rechts naast de cassette.
- Duw de cassette iets naar rechts en trek de cartridge uit het compartiment.



Verkorte handleiding DCA Vantage voor HbA1c, gekoppeld

Versie 4
(22-07-20)

2. KOPPELING

2.1. Verbinding

Controleer voor het meten:

- Dat de het lampje van de Firefly groen brandt en niet knippert.
- Indien van toepassing, dat de Bluetooth adapter in de PC zit.




2.2. Foutoplossing

- Als het Firefly lampje wel groen is maar knippert, controleer dan dat de PC aan staat en de Bluetooth adapter goed is aangesloten. Helpt dat niet, probeer dan de Firefly enkele seconden van de stroom af te halen.
- Als de draadloze verbinding niet in orde is (Firefly lampje knippert of is uit) zullen metingen niet op de PC aankomen. In dit geval kunnen metingen als volgt handmatig opnieuw verstuurd worden vanaf de DCA Vantage:
 - Druk op "Recall"
 - Druk op "Patient Tests"
 - Druk op "HbA1c"
 - Druk op "View Last 10", selecteer gewenst resultaat.
 - Druk op "View"
 - Druk op "Send"
 - Druk op "Home"

2.3. Metingen versturen

Het programma opent automatisch na ontvangst van nieuwe meting(en):

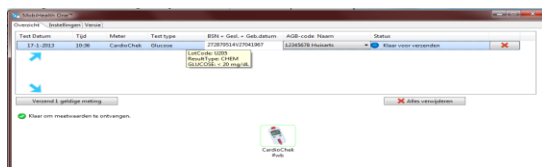

- Controleer het BSN en verzend de metingen met de verzend knop.
- Klik op "Alles verwijderen" als de metingen verstuurd zijn en u de metingen niet meer in het programma wil zien.