

## Verkorte handleiding Afinion, gekoppeld

Versie 3  
(22-07-20)

## Autorisatie Bijlage

Naam	Functie	Handtekening
Dr. Zwart	Directeur	

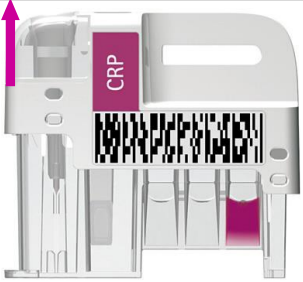
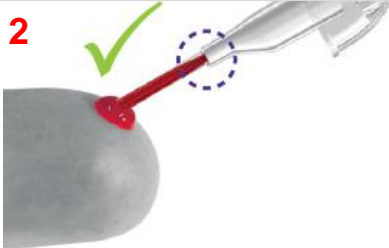
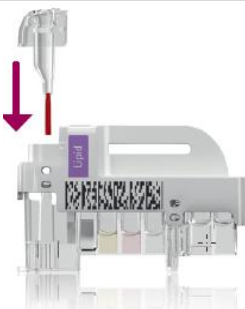









## 1. WERKWIJZE

## 1.1. Conditie

- Voor gebruik moet de cartridge op kamertemperatuur komen (dit duurt ca. 15 minuten).

## 1.2. Uitvoering

- Indien **verschillende artsen**: Ga naar "Menu", "groen poppetje", "arts code invoeren".

<p><b>1</b> </p> <p>Trek de monsterafnamehouder recht uit de Test Cartridge.</p>	<p><b>2</b> </p> <p>Vul het capillair volledig met het patiëntenmonster. Veeg het capillair niet af.</p>	<p><b>3</b> </p> <p>Plaats de monsterafnamehouder meteen terug.</p>
<p><b>4</b> </p> <p>Raak  aan. De klep opent zich automatisch.</p>	<p><b>5</b> </p> <p>Voer de Test Cartridge in met de barcode naar links gericht.</p>	<p><b>6</b> </p> <p>Sluit de klep met de hand om de analyse te starten.</p>
<p><b>7</b> </p> <p>Raak  aan en voer de <b>BSN</b> in.</p> <p>Raak  aan om te bevestigen.</p>	<p><b>8</b> Raak  aan om te accepteren. De klep opent zich automatisch.</p> <p>Het resultaat wordt automatisch verstuurd naar PC waar Mobihealth One™ is geïnstalleerd. Controleer op de PC of resultaat is ontvangen.</p> <p><b>Controleer het BSN</b> en verzend de meting.</p>	<p><b>9</b> </p> <p>Verwijder de gebruikte Test Cartridge en gooi deze weg. Sluit de klep met de hand.</p>

