

# Verkorte handleiding Afinion 2 gekoppeld

Versie 1  
(10-01-22)

## Autorisatie Bijlage



Naam	Functie	Handtekening
Dr. Zwart	Directeur	

## 1. WERKWIJZE

### 1.1. Condities

- Voor gebruik moet de cartridge op kamertemperatuur komen (dit duurt ca. 15 minuten).

### 1.2. Uitvoering

<p><b>1</b></p>  <p>Trek de monsterafnamehouder recht uit de Test Cartridge.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Vul het capillair volledig met het patiëntenmonster. Veeg het capillair niet af.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Plaats de monsterafnamehouder meteen terug.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Raak  aan. De klep opent zich automatisch.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Voer de Test Cartridge in met de barcode naar links gericht.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Sluit de klep met de hand om de analyse te starten.</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Raak  aan en voer de <b>BSN</b> in.</p> <p>Raak  aan om te bevestigen.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Raak  aan om te accepteren. De klep opent zich automatisch.</p> <p>Het resultaat wordt automatisch verstuurd naar PC waar Mobihealth One™ is geïnstalleerd. Controleer op de PC of resultaat is ontvangen.</p> <p><b>Controleer het BSN</b> en verzend de meting.</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Verwijder de gebruikte Test Cartridge en gooi deze weg. Sluit de klep met de hand.</p>

## 2. KOPPELING


### 2.1. Verbinding

Controleer voor het meten dat de PI is aangesloten volgens onderstaande foto.



### 2.2. Metingen versturen

Het programma opent automatisch na ontvangst van nieuwe meting(en):

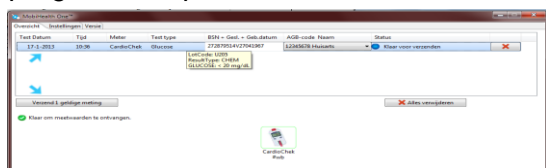

- Controleer het BSN en verzend de metingen met de verzend knop.
- Klik op "Alles verwijderen" als de metingen verstuurd zijn en u de metingen niet meer in het programma wil zien.