

Verkorte handleiding HemoCue, gekoppeld

Versie 5
(22-07-20)


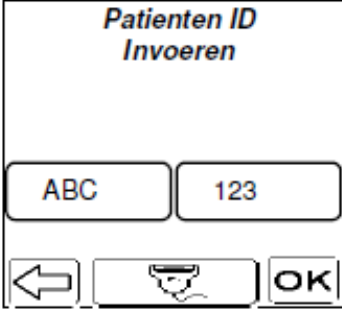
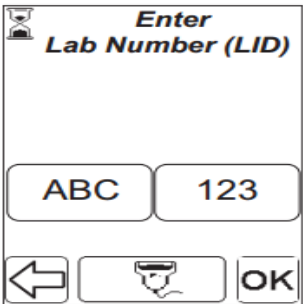
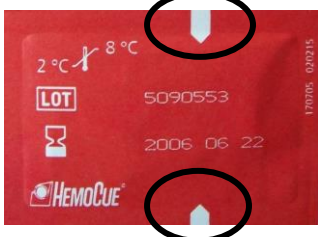
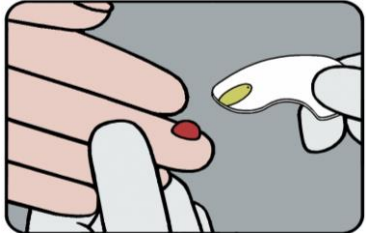


Autorisatie Bijlage

Naam	Functie	Handtekening
Dr. Zwart	Directeur	

1. WERKWIJZE

1.1. Uitvoering

- Laat voor de meting de patiënt zijn/haar handen wassen met water en zeep.

<p>1</p>  <p>Neem de analyser uit de docking. Zet de analyser aan door op de zwarte knop te drukken. Open de cuvettehouder. Druk op knopje met het cuvetje. Volg de instructies op het scherm.</p>	<p>2</p>  <p>Druk op 123 en toets het BSN in. Druk op OK (2x)</p>	<p>3</p>  <p>Indien meerdere artsen: druk op ABC en toets de arts-initialen in. Druk op OK (2x)</p>
<p>4</p>  <p>Open de cuvetteverpakking op de 2 aangegeven witte pijltes en pak de cuvette aan de achterkant vast.</p>	<p>5</p>  <p>Vul de cuvette in 1 keer. NOOIT BIJVULLEN. Controleer de cuvette op luchtbellen en veeg overtollig bloed aan de zijkanten weg met een gaasje.</p>	<p>6</p>  <p>Leg de gevulde cuvette binnen 40 seconden in de cuvettehouder en druk deze dicht.</p>
<p>7</p>  <p>De uitslag verschijnt op het display, druk op OK.</p>	<p>8</p> <p>Plaats de analyser terug in het dockings station</p> <p>Het resultaat wordt automatisch verstuurd naar PC waar Mobihealth One™ is geïnstalleerd. Controleer op de PC of resultaat is ontvangen. Controleer het BSN en verzend de meting.</p>	<p>9</p> <p>Cuvette verwijderen: Open de cuvettehouder en verwijder de cuvette</p>

2. KOPPELING

2.1. Verbinding

Controleer voor het meten:

- Dat het Dockingstation van de HemoCue en de Rasperry Pi via de netwerkkabel verbonden zijn.
- De Bluetooth stick in de Rasperry Pi zit en dat op de Rasperry Pi het lampje brandt.
- Indien van toepassing, de Bluetooth adapter in de PC zit.




2.2. Foutoplossing

- Als er geen lampje op de Rasperry pi brandt, kunt u deze uit/aanzetten.
- Als de draadloze verbinding niet in orde is zullen metingen niet op de PC aankomen. In dit geval worden de nieuwe metingen automatisch verstuurd zodra de verbinding weer opgezet is. De HemoCue uit het dockings station halen en er weer in leggen kan het versturen versnellen.

2.3. Metingen versturen

Het programma opent automatisch na ontvangst van nieuwe meting(en):

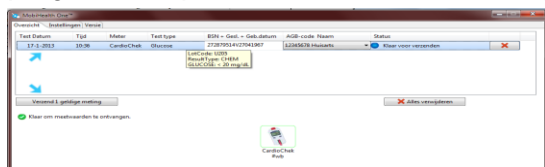

- Controleer het BSN en verzend de metingen met de verzend knop.
- Klik op "Alles verwijderen" als de metingen verstuurd zijn en u de metingen niet meer in het programma wil zien.