

## Verkorte handleiding HemoCue Hb

Versie 2  
(22-07-20)**Autorisatie Bijlage**

Naam	Functie	Handtekening
Dr. Zwart	Directeur	

**1. WERKWIJZE****1.1. Uitvoering**

1




Trek de cuvettenhouder in de laadpositie. Zet de analyzer aan door op de linker knop te drukken.

2




Open de cuvetteverpakking op de 2 aangegeven witte pijltes en pak de cuvette aan de achterkant vast.

3

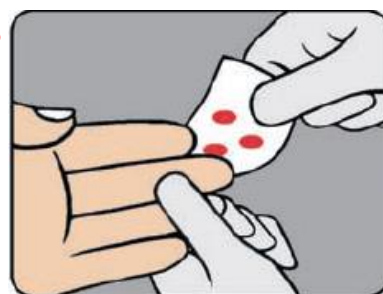


Prik in de vinger en veeg de eerste 2-3 druppels weg.

4

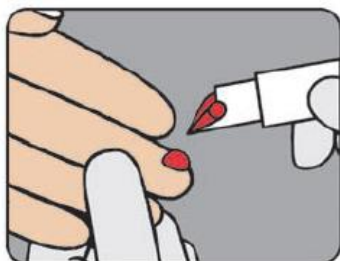

Vul de cuvette in 1 keer. **NOOIT BIJVULLEN**. Controleer de cuvette op luchtballen en veeg overtollig bloed aan de zijkanten weg met een gaasje.

5

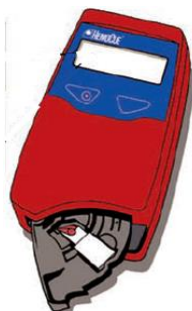

Leg de gevulde cuvette binnen 10 minuten in de cuvettehouder en druk deze dicht.

6



Na 15-60 seconden verschijnt de uitslag op het display.

**1.2. Cuvette verwijderen**

- Open de cuvettehouder en verwijder de cuvette.