

# Verkorte handleiding DiaSpect Hb

Versie 2  
(22-07-20)

## Autorisatie Bijlage

Naam	Functie	Handtekening
Dr. Zwart	Directeur	

## 1. WERKWIJZE

### 1.1. Afname


- Voer een vingerprik uit volgens de standaard procedure.



Verwijder de eerste 3 druppels en controleer of er vrije bloeddoorstroming aanwezig is alvorens de cuvet te vullen met de monsterdruppel.




Zorg ervoor dat de bloeddruppel voldoende groot is om de cuvet te vullen. Vul de cuvet door de hoek van de cuvet naar de bloeddruppel te brengen. Vul de cuvet zonder onderbreking.

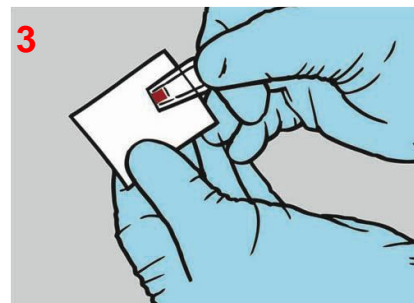


Veeg de buitenkant van de cuvet af. Controleer of de cuvet volledig is gevuld.

### 1.2. Meting

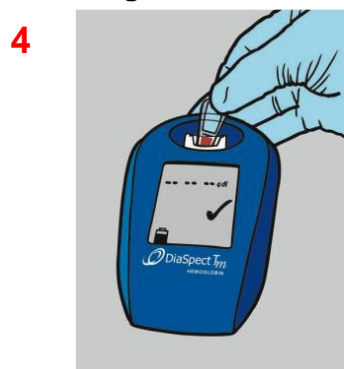

Plaats de gevulde cuvet in de cuvetthouder en druk het voorzichtig naar beneden tot u een "klik" voelt en het Hb wordt weergegeven.

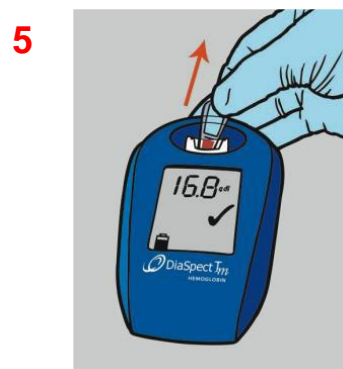

Haal de cuvet direct uit de cuvetthouder. Registreer het testresultaat zodra het vinkje wordt weergegeven.



Het resultaat zal op de display blijven staan tot de volgende meting wordt uitgevoerd. Als u het laatste resultaat wilt wissen, kunt u een "blanco" meting uitvoeren door de lege cuvetthouder naar beneden te drukken.