











Autorisatie Bijlage

Naam	Functie	Handtekening
J.M. Cuffy-van Maarseveen	Labmanager	

1. WERKWIJZE

<p>1. Zorg dat er een RFID kaart aanwezig is op de analyzer.</p> 	<p>2. Druk op “Meting” om een meting te starten</p> 
<p>3. Het test scherm geeft het type test en de hoeveelheid tests die nog aanwezig zijn in de kit weer. Druk op de “Play” knop om door te gaan.</p> 	<p>4. Alle opgeslagen operators worden hier in een dropdown menu weergegeven. Selecteer de juiste.</p>  <p>Druk op de  om door te gaan.</p>
<p>5. Door op het gewenste veld te tikken kun je de informatie hierin wijzigen.</p> <p>6. Kies bij monstertype SERUM</p>  <p>Druk op de  om door te gaan.</p>	<p>7. Vul de capillair met serum</p> 
<p>8. Meng de cup nu kort, totdat het materiaal uit het capillair in de vloeistof komt.</p> 	<p>9. Zet de cup in de analyzer en duw de deur dicht.</p> 

Attentie: Na het meten van de serum, het juiste monstertype weer selecteren